

Brugsanvisning

1. Tjek, hvilke side af masken skal vende opad og hvilke nedad.
2. Tag beskyttelsesmasken på og tryk metalstrimlen på masken sammen under næseknoglen, så den passer til din næses facon.
3. Træk undersiden af masken lidt nedad, så den dækker din mund og hage.
4. Tjek masken, så der ikke trækkes ekstra luft ind. Ansigts- eller hovedhår i tætningskantens område kan forhindre at masken bliver monteret korrekt. Om nødvendigt justeres pasformen, indtil masken sidder tæt.

Anvendelsesvarighed

Masken er beregnet til at blive brugt til et arbejdsdskift ved normal brug. Masken er kun egnet til engangsbrug.

Sådan tages masken af

For at tage masken af skal du hive ørestropperne forlæns over dine ører. Ydersiden af masken kan være forurenet med aerosoler. Undgå kontakt.

Brugsanvisning

Åndedrætsværnet er beregnet til engangsbrug.

Udskift den med en ny, tør, ren og velsiddende maske efter brug, hvis den er fugtig, hvis den er synligt snavset, eller hvis den ikke passer korrekt.

Produktets holdbarhed: 3 år ved opbevaringstemperatur fra -20 °C til +30 °C og en maksimal luftfugtighed på 60%.

Masken svarer til DIN EN 149: 2001 + A1: 2009, PPE klasse III og er CE-certificeret.

Mærkningen NR betyder, at masken maksimalt må bruges til et enkelt arbejdsdskift.

Manglende overholdelse af disse instruktioner eller forkert brug kan reducere maskens effektivitet eller forårsage sygdom eller permanent skade.

Denne maske beskytter ikke mod gasser eller dampe. Brug ikke masken på områder med mindre end 17% ilt eller ukendte farlige stoffer såsom koncentrationer, der overstiger de tilladte maksimumværdier.

Anvendelse i eksplosive atmosfærer er udelukket.

Personligt beskyttelsesudstyr til selvbeskyttelse: f.eks. som arbejdsbeskyttelse til renoverings- og isoleringsarbejde, til rengøringsarbejde i industri og husholdning, hygiejnearbejde og arbejde, der udføres i kontakt med mennesker samt beskyttelse mod den aktuelle COVID-19-pandemi.

Opbevaringstemperatur

Maksimal relativ luftfugtighed på lager

Holdbarhedsdato: se masken